

Microtorch



TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

ISTRUZIONI

Leggere attentamente le seguenti informazioni sull'uso prima di utilizzare la Microtorcia.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO


- Rilasciare il BLOCCO DI SICUREZZA spostando l'interruttore sulla posizione "ON"
- La regolazione dell'aria deve essere sulla posizione aperta in modo che si possa vedere attraverso il foro
- Premere il PULSANTE DI ACCENSIONE per accendere la microtorcia
- Per una fiamma costante:
prima di rilasciare il PULSANTE DI ACCENSIONE spostare l'INTERRUTTORE CONTINUO/SPENTO a sinistra
- Per spegnere la microtorcia, spostare l'INTERRUTTORE CONTINUO/SPENTO a destra. Questo interrompe l'afflusso di gas e estingue la fiamma

AGGIUSTAMENTO DELLA FIAMMA



- Spostare la leva di controllo del volume del gas verso la posizione "+" per aumentare la forza della fiamma o la posizione "-" per diminuire la forza della fiamma
- Ruotare la REGOLAZIONE DELL'ARIA per cambiare l'impostazione della fiamma

RIFORMIMENTO DEL GAS

- Assicurarsi che il fuoco sia completamente spento
- Rifornire in ambiente ben ventilato
- Rifornire solo con gas Butano tripla raffinatura
- Mettere la microtorcia in posizione invertita
- Inserire l'ugello della bomboletta del Butano nella VALVOLA DI RICARICA della Microtorcia
- Premere la bomboletta verso il basso fino a che il gas non inizia a traboccare

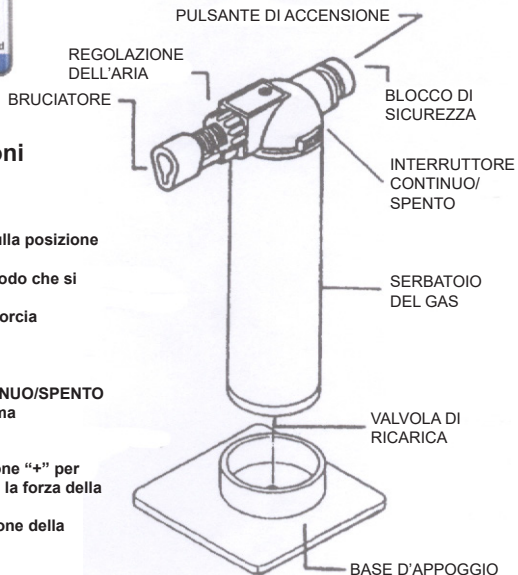

OPERAZIONI:

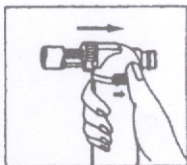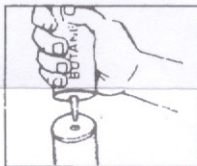

ØxHxW	36mm. x 137mm. x 106mm.
TEMPERATURA	1300°C 2450°F
TEMP (FERRO DA SALDATURA)	200° - 450°C/390° - 840°F
VOLUME	BUTANO 64 ml
DURATA FIAMMA	1 ora ogni ricarica completa

DESTINAZIONI D'USO

