

AVVERTENZA:

1. l'altezza massima della fiamma non dovrebbe essere troppo ampia
2. la torcia non può restare accesa a lungo e non può essere usata capovolta o fatta cadere
3. attendere 10 minuti prima dell'utilizzo dopo la ricarica e non agitare
4. tenere lontano da fiamme e non esporre alla luce solare o a temperature superiori ai 40° C
5. tenere fuori dalla portata dei bambini, questa torcia è pericolosa per i bambini
6. tenere a distanza da viso e indumenti

COME ACCENDERE (Fig. ①)

- a: la leva di controllo dovrebbe essere in posizione “+”
- b: premere il pulsante di accensione
- c: rilasciare il pulsante di accensione per far spegnere la fiamma

COME BLOCCARE ACCESO (Fig. ②)

- a: spingere il blocco su “lock” quando premete il pulsante d'accensione e la fiamma resterà accesa
- b: se il blocco è su “off”, bisogna tenere premuto il pulsante d'accensione o la fiamma si spegnerà
- c: il blocco deve restare in posizione “off” se la torcia non è in uso.

COME REGOLARE IL REGOLATORE D'ARIA (Fig. ⑤)

- a: l'intensità della fiamma può essere regolata da fiamma libera a getto agendo sul regolatore d'aria
- b: spingete la leva verso il simbolo della fiamma grande per ottenere una fiamma a getto, se desiderate un uso prolungato, oppure spingete la leva sul simbolo della fiamma piccola per ottenere una fiamma libera per un uso breve.

COME REGOLARE LA LEVA DI CONTROLLO (Fig. ④)

- a: la leva può essere regolata per diversi usi e fiamme
- b: “+” e “-” rappresentano il tipo di fiamma, che può essere regolata in grandezza.

AVVISO SPECIALE:


Questo prodotto ha la funzione di auto-ricarica. In questo modo il gas defluirà quando è in quantità regolare, altrimenti traboccherà. Interrompere la ricarica o la torcia non potrà essere usata bene e potrebbe anche creare pericolo.

MALFUNZIONAMENTO E SOLUZIONE

N.	Problema	Causa	Soluzione
1	Nessuna fiamma	A. gas terminato o non sufficiente	A. ricaricare
		B. nessuna fiamma dopo la ricarica	B. attendere 10 minuti o regolare l'interruttore se necessario
		C. il regolatore dell'aria è troppo vicino al simbolo della fiamma grande	C. spostare verso la fiamma piccola
		D. l'ugello perde	D. sostituire
2	La fiamma è troppo larga	Gas in grande quantità	Spostare la leva di controllo verso '-'
3	La fiamma è troppo piccola	A. troppo poco gas	Spostare la leva di controllo verso '+'
		B. la pressione dell'aria è troppo bassa o il gas è volatile	Scaldare con le mani fino a temperatura normale.
		C. il gas nel serbatoio non è sufficiente	C. ricaricare
4	La fiamma è a forma di tampone	A. parte bloccata	A. sostituire
		B. il regolatore dell'aria è troppo vicino al simbolo della fiamma grande	B. spostare verso la fiamma piccola
Avviso: nessuno può riparare la torcia eccetto il produttore			

COME RICARICARE:

- a: capovolgere la torcia in modo da avere la valvola di ingresso gas in alto
- b: inserire il tubo della ricarica nella valvola e premere per alcuni secondi
- c: ricaricare lontani da fiamme libere
- d: vietato accendere quando si ricarica

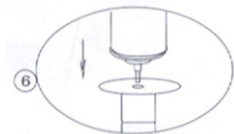

Dimensioni prodotto	Diam. base 62 mm., largh. tot. 76 mm., alt. 155 mm.
Peso lordo	145 gr.
Pressione interna	(0,35 ± 0,05) MPa
Tempo di utilizzazione	20 - 40 min.
Temperatura della fiamma	1300° C
Misura della fiamma	Minimo 35 mm., massimo 55 mm. sotto i 22° C di temperatura dell'ambiente
Capacità del serbatoio del gas	Spostare la leva di controllo verso '+'