




**1** Smussare i bordi mantenendovi distanziati 6mm. dai bordi gengivali. Marcate con un pennarello la linea centrale dell'impronta.

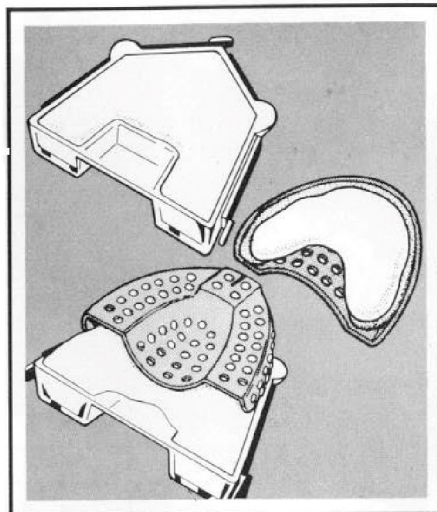


**2** Posizionate le due clips nere di chiusura. Isolate il Tricodent-Tray con silicone spray o equivalente. Colate l'impronta come di consueto utilizzando lo stesso impasto per riempire il Tricodent-Tray. Prima dell'indurimento posizionate il portaimpronta capovolto sul Tricodent-Tray.

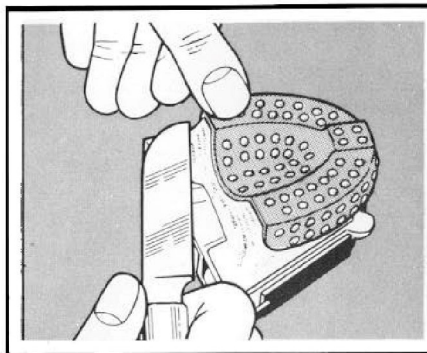


**3** Assicuratevi che il modello sia perfettamente allineato e livellate gli eccessi.

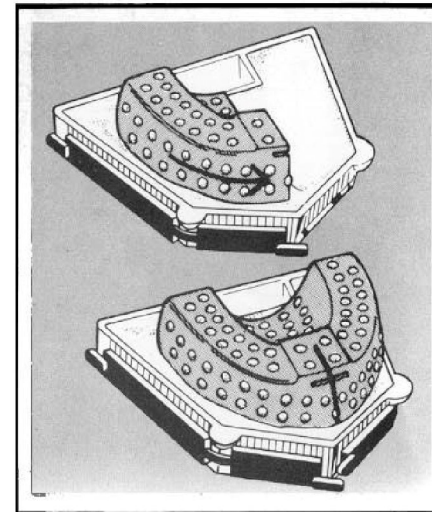


**4** In caso di impronte parziali mantenere la linea mediana al centro del Tricodent-Tray.

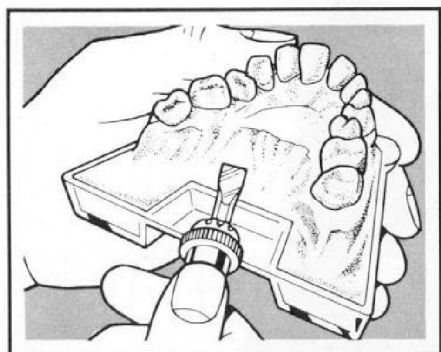


**5** Dopo l'indurimento smodellate l'impronta ed eliminate gli eventuali eccessi.

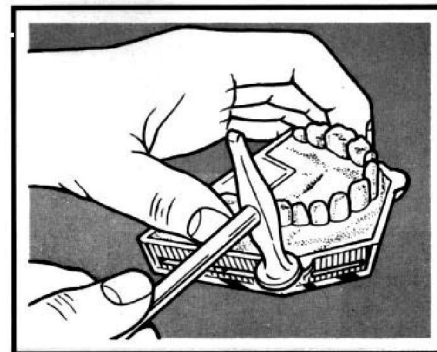

**6** Togliete le due clips nere e sfilate il modello aiutandovi con un martelletto agendo sulle due orecchiette esterne e sul retro.

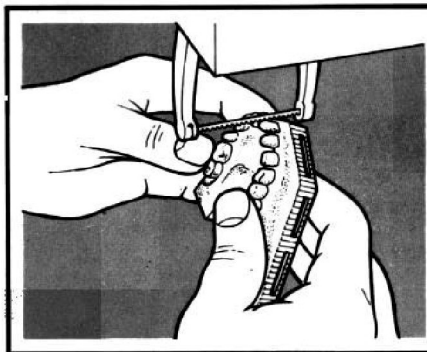

**7** Qualora l'impronta presenti denti particolarmente divergenti si consiglia sezionare il modello al centro e sugli estremi per facilitare la rimozione.

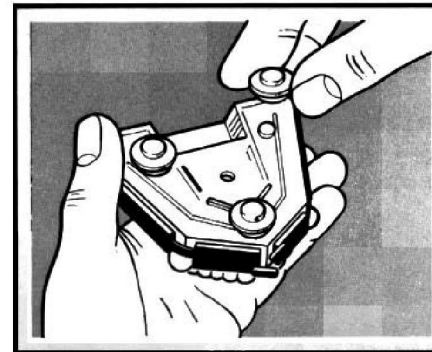

**8** Assicurarsi che il Tricodent-Tray sia libero da detriti. Riposizionate le sezioni e inserite le due clips di fissaggio. Potrete mettere il Tricodent-Tray in articolatore utilizzando i tre bottoni.